

iD Fitting instructions (Slovenian)



iD Light Advanced

Medicinski pripomočki, predloge iD Light so primerne za osebe z lahko do srednjo stopnjo inkontinence. Na voljo so v različnih vpojnostih in velikostih.

Predloge morajo biti pravilno nameščene v kolikor želimo zagotoviti udobje in funkcionalnost.



Predlogo razprite in jo prepognite po dolžini na polovico, da se oblikuje "žleb", ki povečuje funkcionalnost izdelka. V kolikor je na stranskih robovih predloge elastika ali pena, bo le ta pripomogla k lepši obliki oz. funkcionalnosti.

S spodnje strani predloge odstranite samolepilni trak.



Predlogo vstavite na spodnje perilo in jo namestite predvsem na del, kjer močite.



Oblecite spodnje perilo s pritrjeno predlogo, pri čemer bodite pozorni da ta ostane na zelenem mestu.

Predloge za lahko in srednjo stopnjo inkontinence se naj vedno uporablja v kombinaciji z dobro prilegajočim spodnjim perilom.



iD For Men



Predlogo iD For Men razprite in odstranite samolepilni trak na njeni spodnji strani.



Prepričajte se, da je širši del izdelka spredaj. Predlogo namestite v spodnje perilo in preverite, če je lepilni trak varno in zanesljivo pritrjen.



Oblecite spodnje perilo in začutite udobje in varnost. Priporočamo, da predlog iD For Men ne uporabljate v ohlapnem spodnjem perilu, na primer v boksericah. Predloge bodo najbolj učinkovite, če jih boste namestili v dobro prilegajoče se spodnje perilo.