



iD Form

Medicinski pripomočki, anatomske predloge iD Form so primerne za osebe s težko do zelo težko stopnjo inkontinence. Na voljo so v različnih vpojnostih in velikostih. Uporaba teh pripomočkov se svetuje v kombinaciji z mrežastimi hlačkami, ki zadržijo predlogo na pravem mestu. V kolikor se ne uporablja mrežastih hlačk, se svetuje uporaba dobro oprijetega spodnjega perila.

Predloge morajo biti pravilno nameščene v kolikor želimo zagotoviti udobje in funkcionalnost.



Mrežaste hlačke namestite nekje do sredine stegen, nato predel pasu obrnite prosti kolenom, da je pripravljen prostor za vstavev pripomočka.

Anatomsko predlogo razprite in jo prepognite po dolžini na polovico, da se oblikuje "žleb" pri čemer se dvignejo zaščitni zavihki (stranska zaščita pred iztekanjem).



Anatomsko predlogo potisnite med nogami (nameščanje od spredaj proti zadnjemu, hrbtnemu delu), pri čemer je manjši del predloge na sprednji strani. Predlogo namestite v pravi položaj s pomočjo linije indikatorja vlage.



Anatomsko predlogo potisnite med nogami (nameščanje od spredaj proti zadnjemu, hrbtnemu delu), pri čemer je manjši del predloge na sprednji strani. Predlogo namestite v pravi položaj s pomočjo linije indikatorja vlage.

Poravnajte sprednji in zadnji del in bodite pozorni na to, da so zaščitni zavihki ostali dvignjeni.



Oblecite mrežaste hlačke in po potrebi popravite predlogo v pravilen položaj.